


採取～郵送までのご案内

PCR検査 唾液採取用キット セット内容

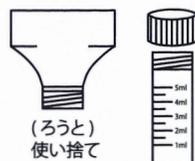

(ろうと)
使い捨て


A 唾液保存容器セット



B 保存液




C ナンバリングシール
4枚入

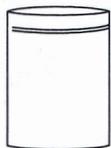

D 密封袋



E お申し込み用紙

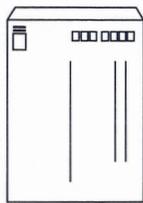


F 返信用封筒

注意事項

採取前30分程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用したうがいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいでから採取してください。




採取時に水で軽く口をゆすいでください。**A**の唾液保存容器に付属の「ろうと」をしっかり取り付け、唾液を採取してください。
唾液や痰に新型コロナウイルスのRNAが含まれていないか、検査いたします。

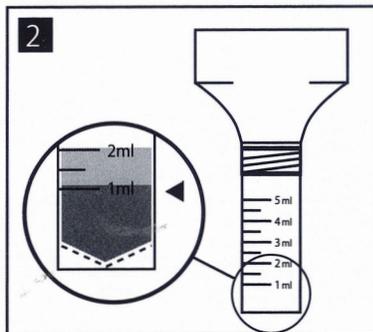

唾液を採取容器の「1～2ml」の目盛りくらいまで入れてください。泡などなるべく入らないよう、お気をつけください。


※正しい検査のために唾液の量にご注意ください。

表面 裏面もご確認ください。

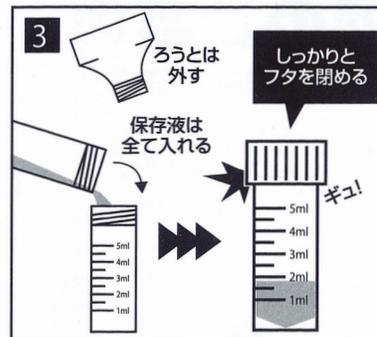


「ろうと」を外し、**B**の保存液を**A**の唾液保存容器に全て入れて、フタをしっかりとねじ込んで締めてください。

※フタが締まっていないと検査が出来ない場合がございます。
※「ろうと」はプラごみとして捨ててください。

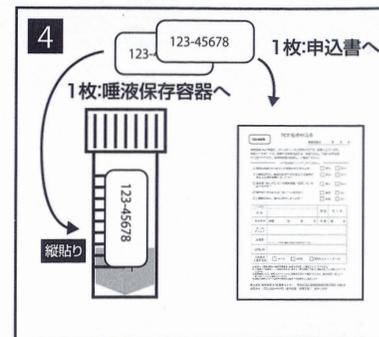


フタをした唾液保存容器へ**C**のナンバリングシールを貼り付け、**E**の申し込み用紙へもナンバリングシールを貼ります。

※ふたに被らないように容器本体に貼ってください。

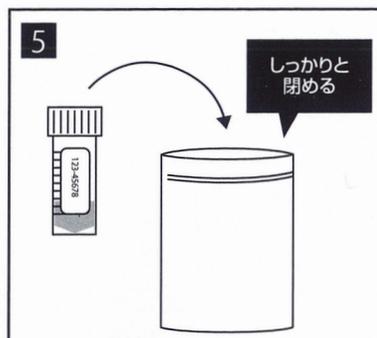

唾液保存容器を密封袋へ入れます。密封袋がしっかり閉じているか確認してください。
※密封されていない場合、正しい測定が出来ない場合がございます。

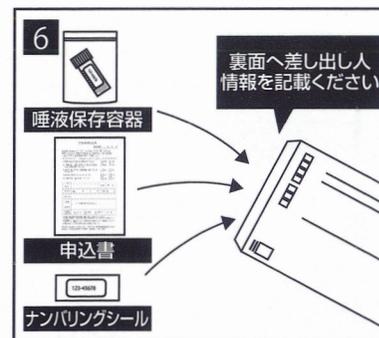

Eのお申し込み用紙へ必要事項などを明記いただいてから、**F**の返信用封筒へ「唾液保存容器が入った密封袋」と「お申し込み用紙」、「ナンバリングシール」を入れて、封筒を閉じてください。
封筒の裏面には差出人のお名前と住所をご記入ください。

ナンバリングシールは1枚はお客様保存用です。
お問い合わせの際などに必要になる場合がございますので、大切に保管してください。

裏面